

EHRlich. RICHTIG. GUT.



Das AllDent Zahnzentrum
Produktinformation CLEARsplint®

Kurz und Kompakt

www.alldent.de

AllDent
ZAHNZENTRUM

CLEARsplint®

frei von Methylmethacrylaten (MMA)



Interimsversorgung (oben)

Aufbisschiene (rechts)



Premium-Komfortschienen

- zum Schutz der Zähne
- bei Knirschern / bei Kopfschmerzen oder Verspannung der Kaumuskulatur

oder

Unsichtbare Interimsversorgung

- zum provisorischen Schluss von Zahnlücken
- z. B. nach Implantaten
- ohne Metallklammern



hohe Flexibilität
unbemerkt Tragen

Das Besondere

- absolut präzise Passung
- nahezu durchsichtig
- hohe Verträglichkeit, da frei von MMA
- spannungsfreier Tragekomfort (Memory Effekt)
- hohe Bruchstabilität
- vergilbt nicht, da frei von Aminen
- Herstellung im AllDent-Meisterlabor
- natürlich zu AllDent-Sonderpreisen

PFLEGEHINWEISE

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer CLEARsplint® Premium-Versorgung!

So haben Sie lange etwas davon:

- 2x täglich mit der Zahnbürste und Flüssigseife reinigen
- Keine Zahnpasta, Prothesenreiniger oder alkoholhaltige Desinfektionsmittel verwenden
- Vor dem Einsetzen mindestens 10 Sekunden in ca. 50° C warmes, nicht kochendes Wasser legen